

<b>TotalEnergies</b> <b>Proxi Nord Est</b>	Consignes d'utilisation : Utilisation d'un masque de type chirurgical	
---	--	--

Mise en place du masque de type chirurgical	
 <span style="color: yellow; border: 1px solid yellow; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">1</span>	Avant de mettre le masque, <b>désinfectez-vous les mains</b> . Préétirez chaque bande élastique sur toute sa longueur par petites tractions successives tous les 3-5 cm. Placez le masque sur le visage, <b>la face blanche tournée vers vous</b> et passez les élastiques derrière les oreilles.
 <span style="color: yellow; border: 1px solid yellow; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">2</span>	Moulez la zone du nez en pressant du bout des doigts des deux côtés du nez.
 <span style="color: yellow; border: 1px solid yellow; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">3</span>	Du bout des doigts, pincez le haut du nez, dépliez le masque et tirez-le au-delà du menton, ajustez jusqu'à ce que le port soit confortable.

Retrait du masque de type chirurgical	
Après usage, avant de retirer votre masque, procédez à la <b>désinfection de vos mains</b> (eau et savon ou solution hydro-alcoolique). Puis, retirez le masque en saisissant par l'arrière les lanières ou les élastiques sans toucher la partie avant du masque. Ensuite, jetez-le dans un sac poubelle prévu uniquement à cette utilisation que vous prendrez soin de fermer. Procédez ensuite à la <b>désinfection de vos mains</b> (eau et savon ou solution hydro-alcoolique).	

<u><b>A porter uniquement lorsque vous le jugez nécessaire</b></u>  <i><b>Le strict respect des GESTES BARRIERES est primordial pour lutter contre une contamination par le virus.</b></i>  <i><b>Jetez et remplacez ce masque si celui-ci est endommagé ou contaminé par des fluides corporels (salive)</b></i>
--